

Oxyal™

Lubrikační oční roztok s kyselinou hyaluronovou a esenciálními minerály

Složení: Sodná sůl kyseliny hyaluronové 0,15 %, kyselina boritá, Protector™ *, chlorid sodný, chlorid draselný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu hořčičnatého, Oxyd™** 0,06 %, aqua purificata q.s.

Popis: Oxyal™ je lubrikační oční roztok, který obsahuje kyselinu hyaluronovou 0,15 %. Kyselina hyaluronová obsažená v tomto přípravku je vyráběna fermentací a není zvířecího původu. Její aktivita je optimalizována a prodloužena synergickým účinkem filmogenního polymeru Protector™.

Přítomnost minerálů (chloridy, sodík, draslík, vápník a hořčík), které jsou nezbytné pro buněčné biochemické procesy, a mírná hypotonie roztoku umožní udržitelnost očního povrchu ve fyziologickém stavu.

Oxyal™ obsahuje Oxyd™, což je ochranný systém nově vyvinutý a patentovaný výzkumnými laboratorními společnostmi TUBILUX PHARMA, který se po kontaktu s očním povrchem rozkládá na kyslík, vodu a chlorid sodný. Tyto látky se vyskytují přirozeně v slzné tekutině, nedráždí oční sliznici a udržují zdravé epitelie.

Indikace: Oxyal™ zajišťuje rychlou a trvalou úlevu v případě pocitu suchých, podrážděných nebo unavených očí, který není způsoben patologickými stavy a je navozen zevními faktory, jako jsou například dlouhé sledování obrazovek a monitorů, vzduchotechnika, prach, znečištěné ovzduší, kouř atd.

Oxyal™ je určen pro nositele všech typů kontaktních čoček i pro osoby, které kontaktní čočky nenosí.

Dávkování: jedna až dvě kapky do obou očí, neurčí-li lékař jinak.

Pokyny k použití:

- Zkontrolujte, zda není obal porušený.
- Dlaně si umyjte a opláchněte ruce.
- Lahvičku otevřete tak, že horní víčko zcela odšroubujete a potom odломíte bezpečnostní pečeť.
- Otočte lahvičku dnem vzhůru a do každého oka kápněte jednu nebo dvě kapky, případně jinak dle rady očního lékaře.
- Po použití lahvičku pevně uzavřete.
- Přípravek neponechávejte na přímém slunečním světle.

Varování:

- Po otevření lahvičky je nutné roztok spotřebovat do 60 dnů.
- Zbylý roztok je nutné zlikvidovat.
- Nedovolte, aby se konec kapátka dotknul jakéhokoli povrchu, abyste zabránili možné kontaminaci.
- Nepoužívejte v případě specifické hypersensitivity vůči některé z látek obsažených v přípravku.
- Roztok neužívejte vnitřně.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte roztok po uplynutí doby použitelnosti.
- Lahvičku skladujte při teplotě do 25°C.
- V případě přetrvávajících problémů se poraďte s očním lékařem.
- Přípravek Oxyal™ neaplikujte do očí společně s dalšími přípravky, nebo se mohou navzájem ovlivňovat.
- Chraňte před mrazem.

Balení: Lahvička 10 ml.

Výrobce:

Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica 20/22
00040 Pomezia
Itálie

* ProtectorTM patentní řízení probíhá

** OxydTM patentováno